

臨床檢驗科冰浴檢體氣送標準作業流程

1 適用檢體

1.1 目前僅開放 Blood Gas Analysis、Ammonia、Lactate 三項急作生化項目使用氣送，其餘冰浴檢體仍需人工運送。

2 注意事項

2.1 Barcode 紙張須使用具防水功能(料號為 7020560219)，避免在冰浴氣送過程中導致 Barcode 紙張上的資訊因泡水而模糊導致無法辨識。

2.2 Blood Gas Analysis 氣送時一律使用安全針具，不可留針頭。

3 流程

3.1 先將冰塊、少許水與檢體放置檢體標本袋中，務必確保標本袋完全緊密，避免冰浴的水漏出(PS.冰塊與水約八分滿)。



3.2 將裝好檢體的標本袋置入冰浴桶中並蓋緊(可將冰浴桶倒放確認是否蓋緊)。



3.3 確認後把冰浴桶放入氣送桶綠色內袋上方(如下圖示)。(可藉由綠色內袋的海綿緩衝並減少檢體碰撞所產生的風險)，最後刷氣送條碼依氣送檢體的標準作業流程送出檢體。

