

真空採血管，多管採血順序如下：

1. 血液培養瓶

1.1 使用一般空針抽血：血液先置入厭氧瓶，再放入需氧瓶

1.2 使用蝴蝶安全採血針採血：先置入需氧瓶，再放入厭氧瓶

2. 藍頭試管（3.2% Sodium citrate）

3. Blood Gas 採檢管（A line 管）

4. 紅色迷彩管或黃頭試管（Gel）

5. 綠頭血漿試管（Heparin）

6. 紫頭試管（EDTA）

7. 灰頭試管（NaF）

8. 黑頭試管（3.8% Sodium citrate）

真空採血管 多管順序表

Order of Draw for Multiple Tube Collection

CLSI 規範順序	頭蓋顏色 Color Code	添加劑 Additive	翻轉次數 Inversion	檢測項目 Determination	備註 Remarks
1		血液培養瓶--厭氧 血液培養瓶--嗜氧 Blood Culture Bottle		血液培養 Blood Culture	使用一般空針抽血：血液先置入厭氧瓶，再放入需氧瓶 使用蝴蝶安全採血針採血：先置入需氧瓶，再放入厭氧瓶
2		檸檬酸鈉 3.2% Sodium citrate	3-4	血液凝固 Coagulation	
3		促凝劑及分離膠 Activator & Gel Separator	5	生化血清 Chemistry	
4		肝素鋰及分離膠 Li Heparin & Gel Separator	8	生化血漿&特殊檢測 Chemistry&Special Test	

5		噴霧乾燥 K ₂ EDTA K ₂ EDTA Spray-Dried	8	完整血液學及血庫 Hematology& Blood Bank	
6		氟化鈉及 K ₃ EDTA NaF / K ₃ EDTA	8	血糖檢測 Glucose	
7		檸檬酸鈉 3.8% Sodium citrate	5	紅血球沉降速率檢測 ESR	