


分子病理採檢注意事項

收費碼	中文名稱	英文名稱	採血容器與檢體送件盒
00R25162	遺傳性 BRCA1/2 癌症基因檢測	Blood BRCA 1/2 gene mutation det (ACTBRCA-blood)	 <p>採檢管:大紫管 *採血量 8mL*1(檢體不能冰)</p>
00R25157	肺癌 監控檢測分析 (一般型)	Lung cancer monitor (ACTMonitor_lung 11 gene)	 <p>採檢管：專用迷彩管(BCT) *採血量 8mL*2(檢體不能冰)</p>
00R25163	乳癌 監控檢測分析 (一般型)	Breast cancer monitor (ACTMonit_breast 8 gene)	
00R25164	腸癌症 監控檢測分析(一般型)	Colon cancer monitor (ACTMonitor_colon 13 gene)	
00R25158	監控檢測分析(高階型)	Advance cancer monitor (ACTMonitor_plus 50 gene)	
00R25165	Guardant360 癌症基因液態切片檢查 *此項為境外送檢項目，必須嚴格控管採檢時效，故此檢驗項目 周五中午12點後 嚴禁門診病人採檢，請病人周一再來抽血。	Guardant360 liquid biopsy	 <ol style="list-style-type: none"> 採檢管：專用迷彩管(BCT) 採血量 10mL*2(檢體不能冰) 抽血前請確認病人已繳費。 請將病人之「基因檢測同意書」(門診護理人員會協助填寫)與檢體一同放入盒內以小電梯傳送至 3F，通知病理組收檢。

*採血結束後請輕微搖晃試管(約 10 下)使管內 EDTA 與血液混合均勻，避免凝固。

*若採血過程需重抽，請同仁自行取用備管。

*若該分子病理項目申請單為單獨開立，請隨檢體附上給病理組；若與其他檢驗項目並單，請病理組自行補印申請單。

*有任何問題請立即聯絡病理組，分機#84870。

資料來源：PLM-QP-SOP-001 檢體採集手冊