

臨床檢驗科檢體採集手冊

一般檢驗室檢體採集手冊(GL-SOP-P014F03)

收費代碼	檢驗項目	檢體種類	檢體量	參考值	容器(採取方法)	操作時間	報告時間	備註
24001D	C.B.C	Blood	2mL	WBC 4.1-10.5 x10 ³ /mm ³ RBC M : 4.3-6.0 M/mm ³ F : 3.8-5.1 M/mm ³ HGB M : 13.4-17.2 g/dl F : 11.1-15.1 g/dl HCT M : 39.8-50.7% F : 34.7-45.1% MCV 83.4-98.5fL MCH 27.1-33.3 pg MCHC 32.1-35.2 g/dl RDW 11.5-14.5% PLT 160-370 x10 ³ /mm ³	紫蓋真空採血管 (5mL)	W1-W6	急做1小時 非急3天	EDTA 抗凝固劑
24002C	Differential Count(DC)	Blood	2mL	Band 0-5% Seg 41.8-71.8% Lym 20.7-49.2% Mon 3.3-9.2% Eos 0.5-7.5% Baso 0.2-1.5%	紫蓋真空採血管 (5mL)	W1-W6	急做1小時 非急3天	EDTA 抗凝固劑
24023F	Total Eosinophil Count	Blood	2mL	100-300/mm ³	紫蓋真空採血管 (5mL)	W1-W5	非急3天	EDTA 抗凝固劑
24033C	Blood Parasite	Blood	2mL	Not found	紫蓋真空採血管 (5mL)	W1-W5	非急3天	EDTA 抗凝固劑
24101I	Bleeding Time(BT)	Blood		1-3 min	耳垂穿刺	W1-W5 PM2:00-3:00	當天	病人請於 PM2:00~3:00 至門診抽血室受檢
24601D	CSF analysis	CSF	1mL		無菌管 (10mL)	W1-W6	急做1小時 非急3天	
24602C	Body fluid analysis	B.F.	2mL		紫蓋真空採血管 (2mL)	W1-W6	急做1小時 非急3天	
24612J	Ascites Fluid	Ascites	2mL		紫蓋真空採血管	W1-W6	急做1小時	

					(2mL)		非急3天	
24613I	Pleural Fluid	P.E.	2mL		紫蓋真空採血管 (2mL)	W1-W6	急做1小時 非急3天	
24616	BAL(analysis; Bronchial Alveolar Lavage analysis	BAL.	2mL		紫蓋真空採血管	W1-W6	急做1小時 非急3天	
24416F	Urine Biochemistry Exam.	Urine	10mL	Sp. G 1.005-1.025 PH 5-8 Protein — Sugar — Ketone — OB — Uro <Normal Bil — Nit — Leu —	尖底離心尿管 (10mL)	W1-W6	急做1小時 非急3天	取新鮮中間尿
24420I	Urine Sediment	Urine	10mL	RBC 0-2/HP WBC 0-5/HP Epi 0-5/HP Cast Negative, Occasional hyaline/LP Crystal Occasional / LP Bacteria Negative	尖底離心尿管 (10mL)	W1-W6	急做1小時 非急3天	取新鮮中間尿
24431E	Chyluria	Urine	10mL	Negative	尖底離心尿管 (10mL)	W1-W5 8:00-16:00	非急3天	取新鮮中間尿
24451I	HCG	Urine	10mL	Negative	尖底離心尿管 (10mL)	W1-W6	急做1小時 非急3天	取新鮮中間尿
24462E	Fungus	陰尿道 分泌物		Not found	壓舌棒	W1-W5	急做1小時 非急3天	以壓舌棒取檢體, 直接送檢
24461F	Trichomonas	陰尿道 分泌物		Not found	壓舌棒	W1-W5	急做1小時 非急3天	以壓舌棒取檢體, 直接送檢
28727D	Blood Ketone body	Blood	2mL	< 0.6 mmol/L	紫蓋真空採血管 (5mL)	W1-W6	急做1小時 非急3天	

24501I	Stool Routine (Microscopic Exam.+ O.B.)	Stool	約花生 粒大	RBC Negative WBC Negative Para & Ova Not found Occult Blood Negative	S-Y 糞便收集器	W1-W6	非急 3 天	
24503G	Para & Ova	Stool	約花生 粒大	Not found	CFEA-P 張氏糞便 濃縮集卵瓶	W1-W5 7:30-14:00	非急 3 天	
24511F	Occult Blood(O.B.) 化學法	Stool	約花生 粒大	Negative	S-Y 糞便收集器	W1-W6	急做 1 小時 非急 3 天	
24513D	Occult Blood(O.B.) HS-LIA	Stool		< 30 ng/ml	採便棒	W1-W6	非急 3 天	
24514C	Occult Blood(O.B.) HS-Immunology	Stool		< 30 ng/ml	採便棒	W1-W6	非急 3 天	
28730C	H. Pylori stool antigen test	Stool	約花生 粒大	Negative	採便容器	W1-W5	非急 3 天	
24621H	Occult Blood(O.B.)	胃液	2mL	Negative	無菌管 (10mL)	W1-W5	非急 3 天	
24512E	Fat	Stool	約花生 粒大	Negative	S-Y 糞便收集器	W1-W5	非急 3 天	
24521C	Amoeba	Stool	約花生 粒大	Not found	S-Y 糞便收集器	W1-W5	非急 3 天	容器置於 37°C 溫水中 立即送檢
24611A	Semen Analysis	Semen	全量	Amount 2-5 ml pH 7.0-8.0 Motility > 60% Sperm count 60-150 M/ml	有刻度透明容器	W1-W5 AM10:00 前	當天	參考採集注意事項, 立即送檢

紫蓋真空採血管



無菌管



尖底離心尿管



S-Y 糞便收集器



CFEA-P 張氏糞便濃縮集卵瓶



採便棒



採便瓶



採便容器



****可接受當日電話口頭醫囑項目：DC (Differential Count)。**

****可接受電話口頭醫囑複驗項目：CBC。**

發報告所需時間

『急件』

收到檢體後一小時內發出報告

『非急件』

操作日當天 16:00 以前收件者，當天 17:30 以後可由電腦終端機查報告。

操作日當天 16:00 以後收件者，隔天 17:30 以後可由電腦終端機查報告。