

## 兒醫部檢驗室檢體採集一覽表(聯絡電話: 75004)

文件編號：PED-SOP-P001F03

發行版次：第 2 版次

發行日期：110 年 7 月 10 日

<b>生化檢體</b>								
收費代碼	檢驗項目	檢體種類	檢體量	參考值	容器(採取方法)	操作時間	報告時間	備註
25085I	Blood gas	Blood	0.5-1.6 mL	pH : 7.35-7.45 pO <sub>2</sub> : 83-108 mmHg pCO <sub>2</sub> : M : 34-45 mmHg F : 32-45mmHg HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> : 22-26 mmol/L Base excess : ( - 3 ) ~ ( +3 ) mmol/L sO <sub>2</sub> : 95~99%	血液氣體專用針筒	週一-週五 8:00 – 17:00	急做 1 小時 常規 3 天	採集血液後， 以冰浴迅速送檢
25145F	G-6-PD	Blood	2ml 0.5ml	NB:12.5 - 21.3U/gHb CH: 8.8 - 18.4U/gHb AD: 6.4 - 12.9U/gHb	紫蓋真空採血管 小兒紫蓋採血管	週一-週五 8:00 – 17:00	14 天	
28501A	Micro bilirubin/Hct	Blood	0.1ml	新生兒黃疸<12mg/dl	玻璃毛細管	週一-週五 8:00 – 17:00	急做 1 小時 常規 3 天	
<b>血液鏡檢檢體</b>								
收費代碼	檢驗項目	檢體種類	檢體量	參考值	容器(採取方法)	操作時間	報告時間	備註

24001D	C.B.C (complete blood count)	Blood	2ml 0.5ml 0.1ml	WBC 4.1 – 10.5 x10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup> RBC M : 4.3-6.0M/mm <sup>3</sup> F : 3.8-5.1 M/ mm <sup>3</sup> HGB M : 13.4-17.2 g/dl F : 11.1-15.1 g/dl HCT M : 39.8-50.7% F : 34.7-45.1% MCV 83.4-98.5fL MCH 27.4-33.3 pg MCHC 32.1-35.2g/dl RDW 11.5-14.5% PLT 160-370 x10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup>	紫蓋真空採血管 小兒紫蓋採血管 微量收集管	週一-週五 8:00 – 17:00	急做 1 小時 常規 3 天	
24002C	Differential Count (DC)	Blood	2ml 0.5ml 0.1ml	Band 0-5% Seg 41.8-70.8% Lym 20.7-49.2% Mon 3.6-9.2% Eos 0.5-7.5% Baso 0.2-1.5%	紫蓋真空採血管 小兒紫蓋採血管 微量收集管		急做 1 小時 常規 3 天	
<b>病毒、細菌快篩檢體</b>								
收費代碼	檢驗項目	檢體種類	檢體量	參考值	容器(採取方法)	操作時間	報告時間	備註
28657E	Adenolex test	Throat swab		Negative	Adenolex 專用 Throat swab	週一-週五 8:00 – 17:00	急做 1 小時 常規 3 天	
28651A	10'Gp A.strept. ID test	Throat swab		Negative	10'Gp A.strept. ID test 專用 Throat swab		急做 1 小時 常規 3 天	

28657E	Adenolex test	Stool	約花生 粒大	Negative	糞便收集盒		常規 3 天	
28655G	Rotalex test	Stool	約花生 粒大	Negative	糞便收集盒		常規 3 天	
28661H	RSV test	Nasal swab		Negative	RSV 專用棉棒		急做 1 小時 常規 3 天	