

兒醫部檢驗室檢體採集一覽表(聯絡電話: 75004)

文件編號：PED-SOP-P001F03

發行版次：第3版次

發行日期：113年1月10日

生化檢體								
收費代碼	檢驗項目	檢體種類	檢體量	參考值	容器(採取方法)	操作時間	報告時間	備註
25085I	Blood gas	Blood	0.5-1.6 mL	pH：7.35-7.45 pO ₂ ：83-108 mmHg pCO ₂ ：M：34-45 mmHg F：32-45mmHg HCO ₃ ⁻ ：22-26 mmol/L Base excess： (-3) ~ (+3) mmol/L sO ₂ ：95~99%	血液氣體專用針筒	週一-週五 8:00 - 17:00	急做1小時 常規3天	採集血液後， 以冰浴迅速送檢
28501A	Micro bilirubin/Hct	Blood	0.1ml	新生兒黃疸<12mg/dl	玻璃毛細管	週一-週五 8:00 - 17:00	急做1小時 常規3天	

血液鏡檢檢體

收費代碼	檢驗項目	檢體種類	檢體量	參考值	容器(採取方法)	操作時間	報告時間	備註
24001D	C.B.C (complete blood count)	Blood	2ml 0.5ml 0.1ml	WBC 4.1 – 10.5 x10 ³ /mm ³ RBC M : 4.3-6.0M/mm ³ F : 3.8-5.1 M/ mm ³ HGB M : 13.4-17.2 g/dl F : 11.1-15.1 g/dl HCT M : 39.8-50.7% F : 34.7-45.1% MCV 83.4-98.5fl MCH 27.4-33.3 pg MCHC 32.1-35.2g/dl RDW 11.5-14.5% PLT 160-370 x10 ³ /mm ³	紫蓋真空採血管 小兒紫蓋採血管 微量收集管	週一-週五 8:00 – 17:00	急做 1 小時 常規 3 天	
24002C	Differential Count (DC)	Blood	2ml 0.5ml 0.1ml	Band 0-5% Seg 41.8-70.8% Lym 20.7-49.2% Mon 3.6-9.2% Eos 0.5-7.5% Baso 0.2-1.5%	紫蓋真空採血管 小兒紫蓋採血管 微量收集管		急做 1 小時 常規 3 天	

病毒、細菌快篩檢體

收費代碼	檢驗項目	檢體種類	檢體量	參考值	容器(採取方法)	操作時間	報告時間	備註
28657E	Adenolex test	Throat swab		Negative	Adenolex 專用 Throat swab	週一-週五 8:00-17:00	急做 1 小時 常規 3 天	
28508D	Group A streptococcus PCR	Throat swab		Negative	Group A streptococcus PCR 專用 Throat swab		急做 1 小時 常規 3 天	
28657E	Adenolex test	Stool	約花生粒大	Negative	糞便收集盒		常規 3 天	
28655G	Rotalex test	Stool	約花生粒大	Negative	糞便收集盒		常規 3 天	
28661H	RSV test	Nasal swab		Negative	RSV 專用棉棒		急做 1 小時 常規 3 天	