

制定日：20231122

修訂日：20241005

IGRA-QFT-PLUS 特殊採管採血操作指引

1. 採血管需回到 17~25 度(室溫)才可使用，

採血管順序：灰→綠→黃→紫





2. 每管採 0.8-1.2mL 的全血。

如果任何採血管內的血液高度，超過指示標記，則應取得新的血液檢體。

當血液已達到到管身標籤上的黑線標線上下限之間，即為標準允收量 (0.8 至 1.2 mL)

3. 採血管在收集血液時，採血管處於 17-25°C 狀態

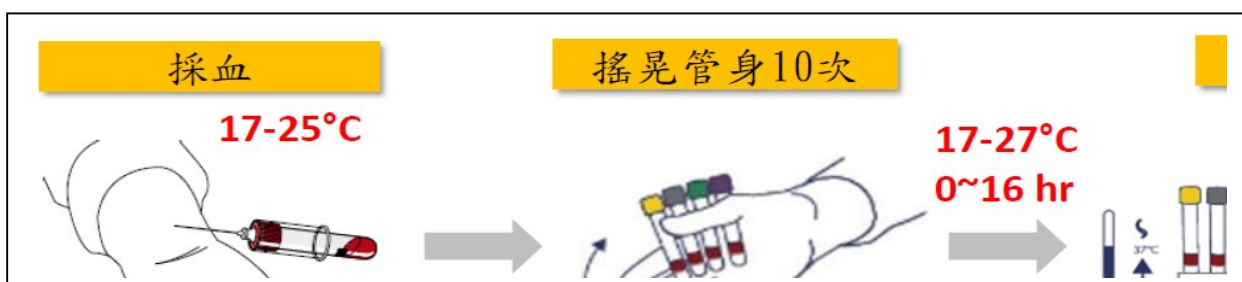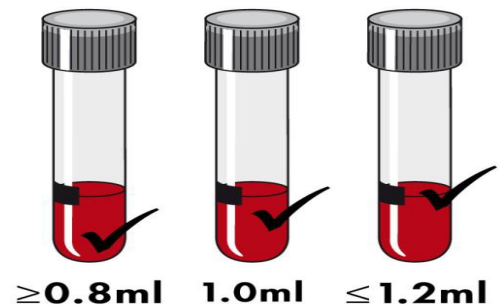

此項檢驗為特殊採檢管未使用前須 4-25°C 保存，執行此項檢驗請事先跟病理檢驗科聯繫拿取採檢管(門診時間至門診抽血室，夜間及假日至 3 樓檢驗科)。

該項檢驗應填寫結核病代檢網分枝桿菌/IGRA 送驗單 (請至屏榮官網→醫療團隊→病理檢驗科→文件下載→其他表單

<https://org.ptvgh.gov.tw/path/cp.aspx?n=280CA192EB287DD1> 並與檢驗單一起盡速送至檢驗科收件